


Pistolet do tłuszczu **Power Injector** umożliwia chirurgowi wstrzykiwanie tłuszczu w porcjach od 0,1 do 3,7 cm<sup>3</sup> przy minimalnym wysiłku i maksymalnej kontroli. Power Injector jest dostarczany z wymiennymi głowicami tłoka i mocowaniami cylindra do użytku z następującymi rozmiarami strzykawek : 5 ml, 10 ml i 60 ml.

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotkami dołączonymi do opakowania i zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i sterylizacji (instrukcje użytkowania), które zostały dostarczone z produktem.

**Przygotowanie urządzenia powinno odbywać się w jałowym polu.**

Używać:

1. Przykręcić nasadkę tłoka odpowiadającą używanej strzykawce na koniec szybu pistoletu.
2. Otwórz jałową strzykawkę. Wyciągnij tłok i zdejmij czarny gumowy korek.
3. Umieść czarny gumowy korek na końcówce głowicy tłoka Power Injector.
4. Wsunąć jałowy cylinder strzykawki na tłok i wcisnąć go do mocowania Power Injector.
5. Wkręcić cylinder strzykawki w mocowanie cylindra pistoletu, które odpowiada strzykawce.
6. Ścisnąć spust wtryskiwacza Power Injector, aż tłok osiągnie stronę dystalną cylindra strzykawki.

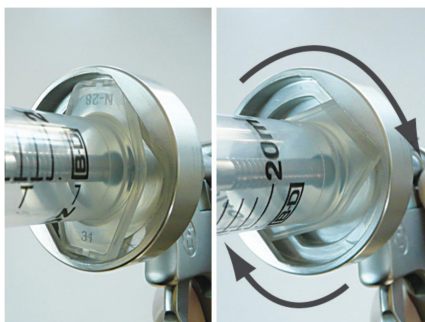

7. Podłączyć transfer do strzykawki.

8. Podłączyć strzykawkę zawierającą tkankę tłuszczową do wstrzyknięcia przez port transferowy luerlock.

9. Nacisnąć przycisk zwalniający tłok Power Injector i odciągnąć trzon tłoka, aby wciągnąć tkankę do pustej strzykawki.

10. Po zakończeniu procesu przenoszenia tkanki wyjąć urządzenie do transferu ze strzykawki do wstrzyknięć. Podłączyć Injector do strzykawki za pomocą łącznika luerlock. Nacisnąć spust Power Injector, aby usunąć całe powietrze, które może pozostać w strzykawce przed użyciem.

#### Czyszczenie pistoletu do lipotransferu Power Injector :

Zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania lub instrukcją obsługi, aby uzyskać instrukcje dotyczące czyszczenia i sterylizacji. Nie czyścić środkami na bazie zasad, takimi które mogą uszkodzić produkt i unieważnić gwarancję.

Stellio Aesthetic [biuro@stellio.com.pl](mailto:biuro@stellio.com.pl)

Tomasz Tytuńczyk tel. +48 501 218 448

